


TADs (приспособления для создания временной опоры)

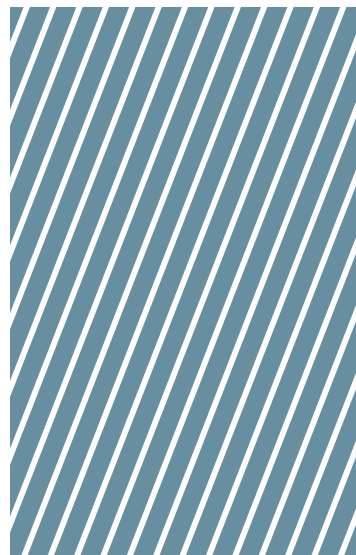

0



TAD PA — это мини-винты, изготовлены из медицинского титана марки 5, специально для небной фиксации экспандеров, дистализаторов и других ортодонтических устройств. Название само по себе указывает на наиболее распространенное применение - небную фиксацию (PA = Небная фиксация). Их можно использовать двумя методами, которые отличаются друг от друга, как по протоколу, так по концепции. **Интегральный TAD PA** вводят в небо после цементации аппарата в полости рта, заканчивая тем самым протокол операции: такой подход называется **TAD в конце**, потому что TAD вводится на последнем этапе. **Двухэтапный TAD PA** вводят в небо после планирования хирургического вмешательства и перед конструированием аппарата: этот подход называется **TAD в начале**, потому что TAD вводится в качестве первого оперативного этапа, за которым следует традиционный или цифровой слепок и изготовление устройства.

TAD PA ИНТЕГРАЛЬНЫЙ

изготовлен из медицинского титана марки 5

TAD PA ДВУХЭТАПНЫЙ

изготовлен из медицинского титана марки 5



стерильная упаковка
колпачок флакона с
титановой опорой для
TAD



стерильная упаковка
колпачок флакона с
титановой опорой для
TAD


самосверлящаяся резьба
обеспечивает простоту хирургической
процедуры и высокую первичную
стабильность.



**TAD PA
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ**



стопорная головка
благодаря выступающей части
можно установить как
экспандер, так и ТАД во время
одной и той же процедуры

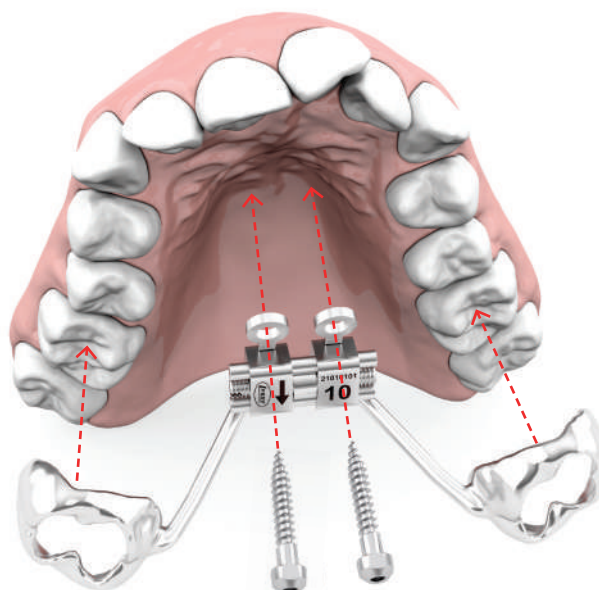


**TAD PA
ДВУХЭТАПНЫЙ**



внутренняя резьба
в выступающей части TADs
для правильного
размещения экспандера с
помощью фиксирующего
винта



фиксирующий винт
для обеспечения правильной
фиксации экспандера


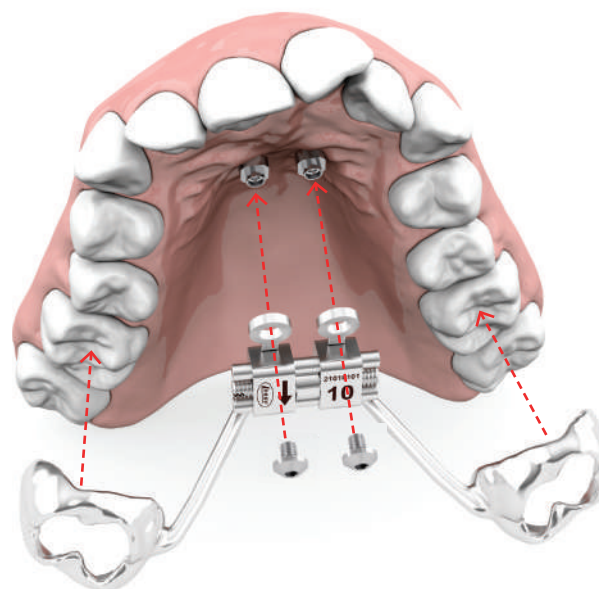


TAD PA ИНТЕГРАЛЬНЫЙ



Интегральный TAD PA Leone представляет собой мини-винт, специально разработанный для создания небной опоры для экспандеров в течении одноэтапной процедуры, когда и экспандер и TAD устанавливаются в течении одного визита. Самосверлящий кончик и особая форма резьбы TAD обеспечивают простую, мало инвазивную хирургическую процедуру и высокую первичную стабильность. Изготовлен из медицинского титана марки 5, доступен в двух вариантах длины, диаметром 2 мм. Предоставляется стерильным и предназначен для использования с соответствующими хирургическими принадлежностями и инструментами Leone. **В упаковке 1 или 2 шт**

	Ø	L		упак.
	мм	мм		
	GH 2,5 mm	8	004-2008-10	1
			004-2008-20	2
	GH 2,5 mm	10	004-2010-10	1
			004-2010-20	2

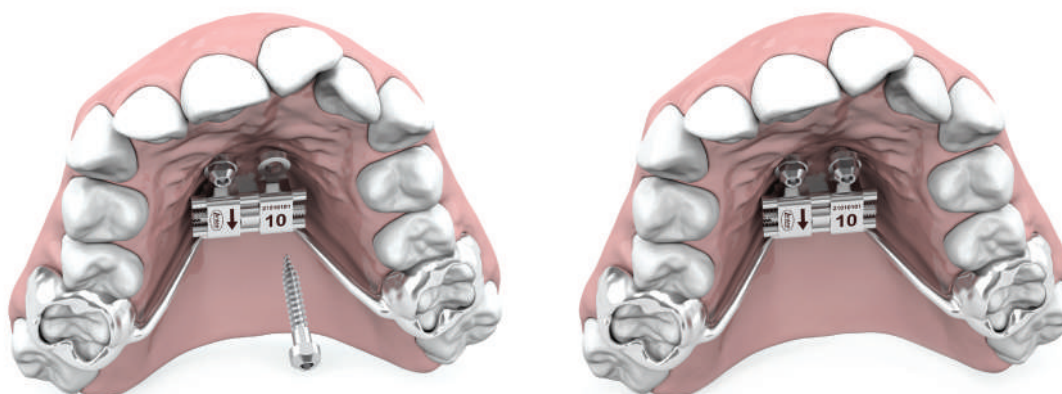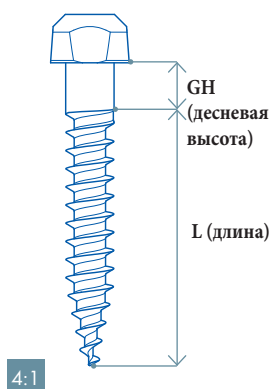


ТАД РА ДВУХ ЭТАПНЫЙ



ДВУХЭТАПНЫЙ Leone TAD - это система, специально разработанная для небной опоры для экспандера с двухэтапной процедурой: за хирургической процедурой установки TADs следует снятие слепка, с помощью аксессуаров для снятия, что позволяет лабораторно изготовить экспандер, как гибридный (опора на зубах и небе), так и полностью только на небе. Изготовлен из медицинского титана марки 5, доступен в четырех вариантах длины, диаметром 2 мм, благодаря особой форме резьбы TAD обеспечивает простую, мало инвазивную хирургическую процедуру и высокую первичную стабильность. Выступающая часть имеет внутреннюю резьбу, которая в сочетании с фиксирующим винтом обеспечивает идеальную фиксацию небного расширителя. Как только TAD будут установлены в наиболее подходящей анатомической области и, благодаря аксессуарам для снятия слепков, как обычным, так и цифровым методом, станет возможным подготовить модель с аналогами TAD для изготовления экспандера с высокой аккуратностью и точностью. Поставляется стерильным и предназначен для использования с соответствующими хирургическими принадлежностями и инструментами Leone.

Упаковка из 1 или 2 шт

Ø	L		упак.
мм	мм		
2	7	003-2007-10	1
		003-2007-20	2
2	9	003-2009-10	1
		003-2009-20	2
2	11	003-2011-10	1
		003-2011-20	2
2	13	003-2013-10	1
		003-2013-20	2

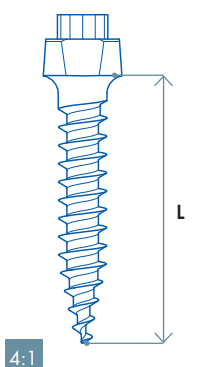

4:1



003-1702-20

2:1



ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ



003-3203-20

2:1

**ЦИЛИНДР И
ФИКСИРУЮЩИЙ
ВИНТ**

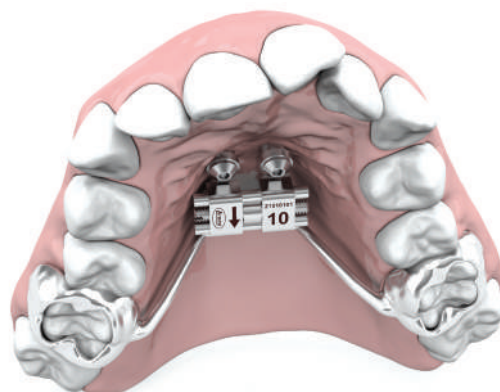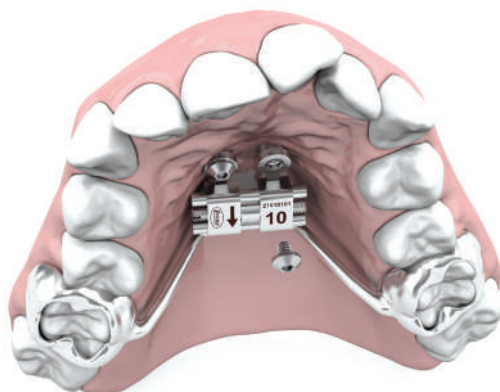

1:1



Ø
L

1,1 мм

9 мм

090-1134-00

СВЕРЛО ДЛЯ TAD

Изготовлено из биомедицинской нержавеющей стали. Для создания пилотного отверстия в случае высокой плотности кости. Может использоваться как для ручного введения, так и для хирургических операций по шаблону с соответствующим наконечником (REF 083-1008-20).

Упаковка из 1 шт.



L 12 мм

1:1

083-1008-20

ХИРУГИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ДВУХЭТАПНОГО TAD PA

Изготовлен из медицинского титана марки 5. Для использования в хирургии по направляющим путем вставки в правильно спланированный хирургический шаблон. Он позволяет осуществлять предварительное сверление кортикального слоя кости с помощью сверла Ø 1,1 мм (REF 090-1134-00) и введение двух этапного TAD PA с помощью адаптера для наконечника TAD PA (REF 083-1006-01).

Автоклавируемый.

Упаковка из 1 шт.



1:1

083-1005-01

083-1006-01

АДАПТЕРЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ TAD PA

Как для двухэтапного TAD PA так и для интегрального TAD PA Изготовлены из биомедицинской нержавеющей стали. Благодаря системе центрирования адаптеры позволяют безопасно закручивать и откручивать TAD с помощью углового наконечника.

Выпускается в двух вариантах длины. Автоклавируемые.

В упаковке 1 шт



1:1

156-1019-00

УДЛИНИТЕЛЬ СВЕРЛА

Изготовлен из биомедицинской нержавеющей стали. В случае необходимости позволяет увеличить длину сверла и адаптеров для наконечников на 16мм. (Продукт из каталога Leone Implant System).

Автоклавируемый.

В упаковке 1 шт



1:1

083-1007-01

РУЧНАЯ ОТВЕТКА ДЛЯ TAD PA

Как для двухэтапного TAD PA так и для интегрального TAD PA.

Изготовлена из биомедицинской нержавеющей стали. Благодаря ручке верного типа, позволяет вручную закручивать и откручивать TAD PA. Она также может быть использована в лаборатории для позиционирования аналога в 3D напечатанной модели.

Автоклавируемая.

В упаковке 1 шт



080-1000-25

ДЛИННЫЙ

1:1

080-1000-24

КОРОТКИЙ

1:1

NEW

АДАПТЕРЫ ДЛЯ TAD PA

Как для двухэтапного TAD PA так и для интегрального TAD PA Изготовлены из нержавеющей стали. Чтобы безопасно затянуть или ослабить TAD PA, используйте отвертку для адаптеров (АРТИКУЛ 080-1000-00). Также может быть использована в лаборатории для позиционирования аналога в 3D напечатанной модели. Доступны в двух вариантах длины. Автоклавируемые



2:1

043-0001-00 ТРАНСФЕР ДЛЯ ДВУХЭТАПНОГО TAD PA


Изготовлен из нержавеющей стали, с металлической резьбовой вставкой при соединении с внутренней резьбой выступающей части ТАД, позволяет с высокой точностью определять положение ТАД методом снятия двухслойного слепка. Для использования с отвертками для фиксации винта. Автоклавируемый. В упаковке 2 шт



1:2

080-1000-00 ОТВЕРТКА ДЛЯ АДАПТЕРОВ

Изготовлена из алюминия. Для безопасного закручивания и отвинчивания TAD PA с помощью адаптеров. Автоклавируемая. В упаковке 1 шт

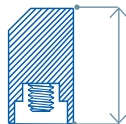

L 7,8 мм

2:1

043-0000-35 SCAN BODY ДЛЯ ДВУХЭТАПНОГО TAD PA

Изготовлен из пластика с металлической вставкой, позволяет с высокой точностью определять положение TAD с помощью внутриротового оптического оттиска или сканирования слепка. Предназначен для использования с позиционером для SCAN BODY арт. 083-0004-00. Автоклавируемый. В упаковке 2 шт



NEW

1:2

080-1000-03 РУЧНАЯ ОТВЕРТКА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ TAD PA

Как для двухэтапного TAD PA так и для интегрального TAD PA. Изготовлен из медицинского титана марки 5. Для безопасного затягивания или ослабления TAD PA с помощью углового наконечника (синее кольцо 1:1). Автоклавируемая. В упаковке 1 шт



1:1

083-0004-00 ПОЗИЦИОНЕР SCAN BODY ДЛЯ ДВУХЭТАПНОГО TAD

Изготовлен из нержавеющей стали, используется для закручивания и отвинчивания SCAN BODY для TAD как на TAD, так и на аналоге для TAD. В верхней части имеется отверстие для вставки страховочной проволоки. Автоклавируемый. В упаковке 1 шт



2:1

053-0001-00 АНАЛОГ ДЛЯ ДВУХЭТАПНОГО TAD

Изготовлен из нержавеющей стали. Используется для переноса положения TAD на слепки или на модель, напечатанную на 3D-принтере с помощью цифрового слепка.

В упаковке 1 шт



2:1

023-1702-20 ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ

Фиксирующий винт, изготовленный из титана марки 5, обеспечивает правильную фиксацию экспандера на TAD. Фиксируется специальными отвертками.

В упаковке 2 шт



2:1

033-3203-20 2 шт. ЦИЛИНДР С КРЕПЕЖНЫМ ВИНТОМ

Цилиндр из нержавеющей стали со встроенным винтом, предназначенный для сварки плеч экспандера или спеченного металлического каркаса. Предназначен для обеспечения фиксации экспандера на двухэтапный TAD PA.

В упаковке 2 шт

L 12,5 мм



L 20 мм



1:1

083-0001-00 083-0002-00

РУЧНЫЕ ОТВЕРТКИ ДЛЯ ФИКСИРУЮЩЕГО ВИНТА

Изготовлены из нержавеющей стали, используются для завинчивания и отвинчивания фиксирующих винтов и трансфера для TAD. Выпускается в двух вариантах длины. Автоклавируемые.

В упаковке

- 1 винтовой адаптер
- 1 ручная отвертка

1:1

083-0003-00

МАШИНАЯ ОТВЕРТКА ДЛЯ ФИКСИРУЮЩЕГО ВИНТА

Изготовлена из нержавеющей стали, используется для завинчивания и отвинчивания фиксирующего винта и трансфера для TAD с помощью наконечника. Максимальный торк 20 Нсм. Автоклавируемая.

В упаковке

- 1 короткий винтовой переходник
- 1 адаптер для наконечника

070-8000-01

ХИРУРГИЧЕСКИЙ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ TAD PA

Изготовлен из пластика PPSU, сконструирован, что бы стерилизовать и хранить в операционной организованными, только инструменты, необходимые для установки TAD и их принадлежности. Крышка при открытии наклоняет положение набора и обеспечивает легкий доступ к инструментам. Набор состоит из 7 инструментов (можно заполнить до 12):

- ручная отвертка для фиксирующего винта короткая
- ручная отвертка для фиксирующего винта длинная
- машинная отвертка для фиксирующего винта
- позиционер scan body для двухэтапного TAD PA
- ручная отвертка для TAD PA
- машинный адаптер для TAD PA, короткий
- машинный адаптер для TAD PA, длинный

Набор полностью автоклавируемый.




070-0000-00

**ПУСТОЙ
НАБОР**




ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА


Конструкция ортодонтического аппарата с костной опорой требует точного планирования лечения клиницистом, который, основываясь на своих суждениях и подготовке, в каждом конкретном случае должен учитывать также все результаты предоперационных обследований, таких как: анамнез, объективные обследования, рентгенологические, инструментальные и лабораторные исследования. Как только поле хирургического вмешательства и наиболее подходящие TAD PA определены, необходимо провести анестезию. TAD PA являются самосверлящимися, однако в случае высокой плотности или толщины кости рекомендуется просверлить кортикальную пластинку сверлом для мини-имплантатов Ø 1,5 мм (артикул 090-1134-00 или артикул 090-1334-00), чтобы легче было установить TAD PA.

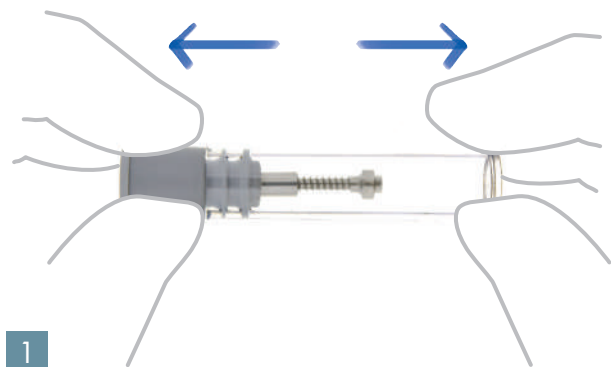


1 Слегка потянув за крышку флакона, извлеките TAD PA из стерильного флакона.

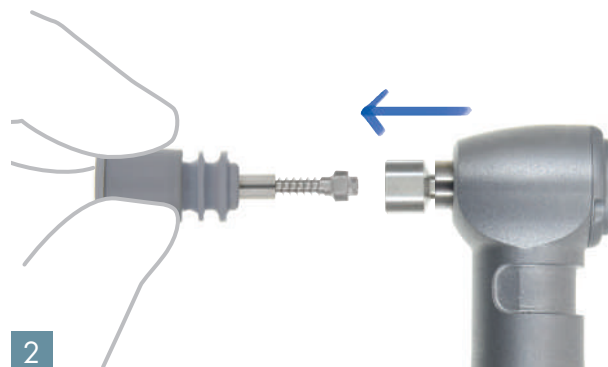

2 Подсоедините специальный машинный адаптер к головке TAD PA.

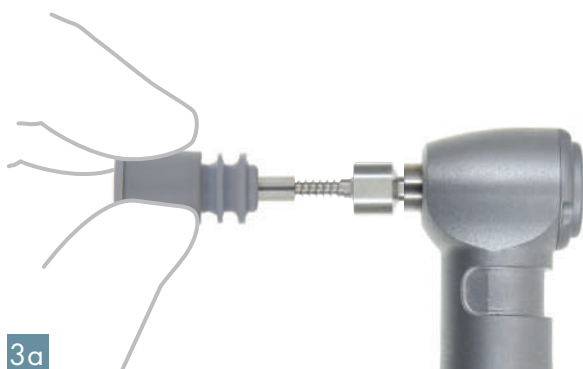


3а

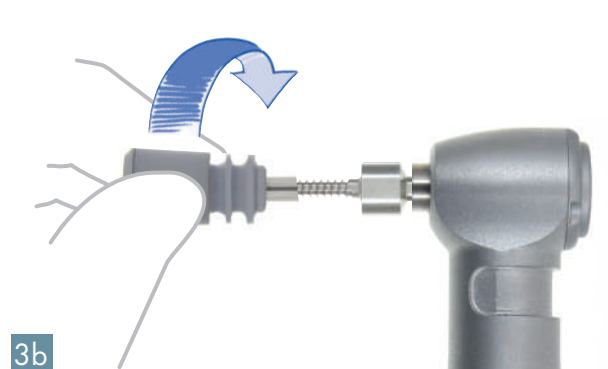


3б

После установки TAD PA в адаптер снимите колпачок имплантата легким вращательным движением против часовой стрелки.

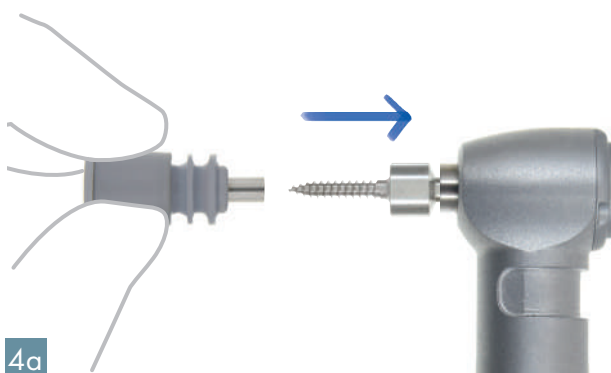

4а

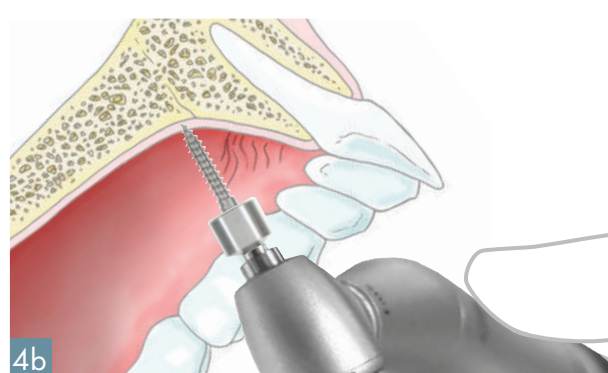



4б

Установите скорость максимально 25 об/мин и торк 40 Нсм, начните сверление TAD PA в небном своде.





Изображения и информация, представленные на этой странице, имеют только информативный характер и не предназначены для предоставления каких-либо терапевтических рекомендаций хирургу-стоматологу, стоматологу, зубному технику или пациенту. Leone Spa прямо отказывается от какой-либо ответственности и не дает никаких гарантий относительно точности или соответствия информации, представленной на этих страницах.

ОБЫЧНОЕ СНЯТИЕ СЛЕПКОВ

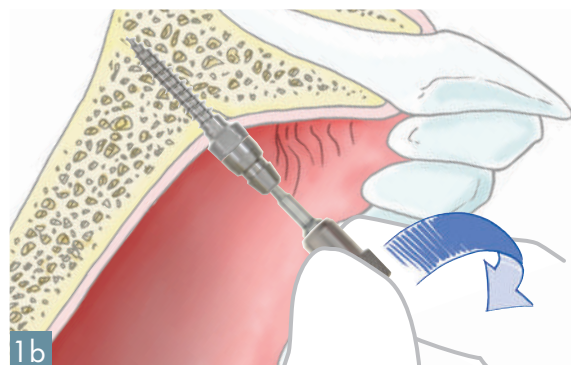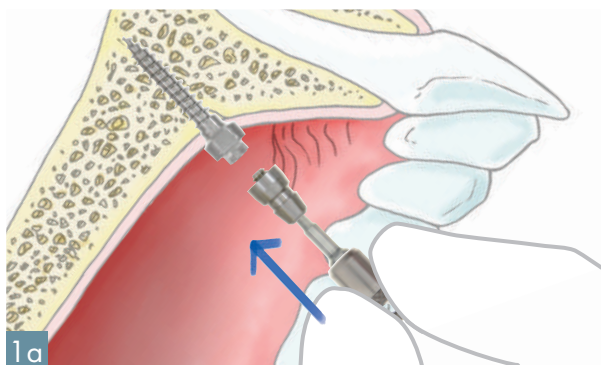


Вверните трансфер в выступающую часть TAD, используя специальную отвертку для фиксирующего винта

2 Снимите слепок с помощью эластомерного материала

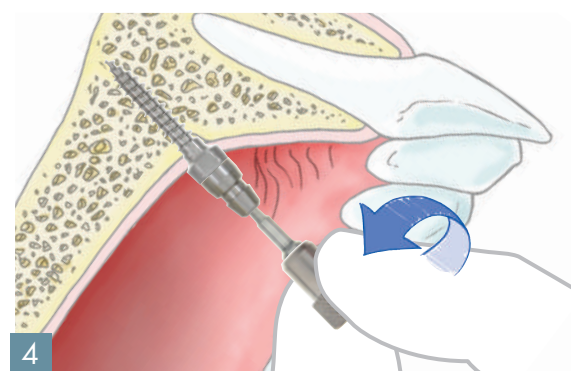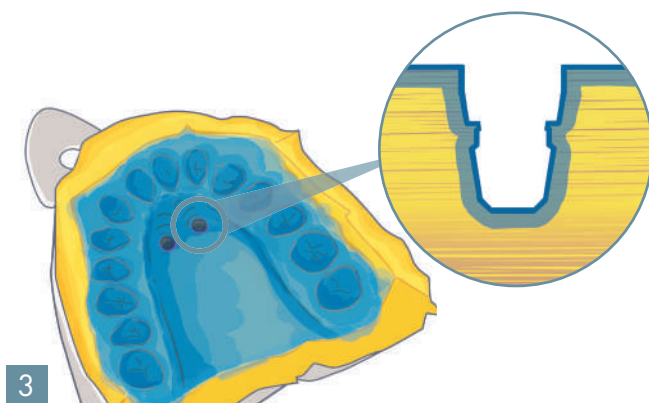


После снятия слепка трансфер остается на TAD, а в слепочном материале остается созданным негатив его формы.

Открутите трансфер с помощью отвертки для фиксирующего винта.

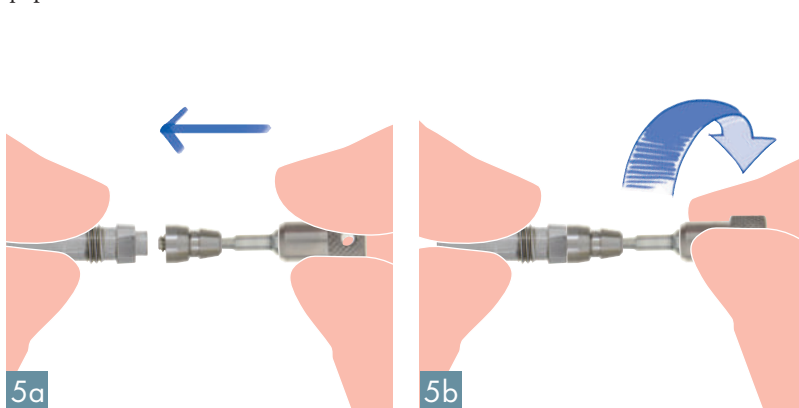

Прикрутите трансфер на аналог.

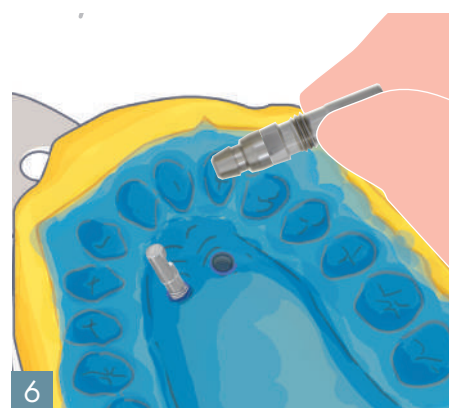


Установите собранный аналог+трансфер в его положение в слепке. Специфическая форма трансфера позволяет легко определить, когда достигается правильное введение. Отливайте модель вместе с установленным аналогом.




Фотографии и информация, описанные на этой странице, носят исключительно информативный характер и не предназначены для предоставления каких-либо терапевтических рекомендаций хирургу-стоматологу, зубному технику или пациенту. Leone Spa прямо отказывается от какой-либо ответственности и не дает никаких гарантий относительно точности или соответствия информации, представленной на этих страницах.


СНЯТИЕ ЦИФРОВОГО СЛЕПКА

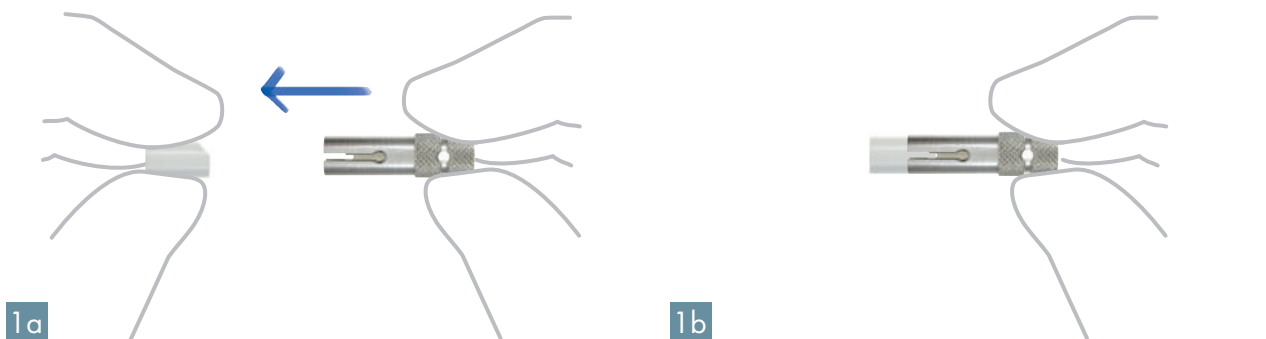

Вставьте Scanbody в специальный позиционер для Scanbody , убедитесь в достижении полного соединения

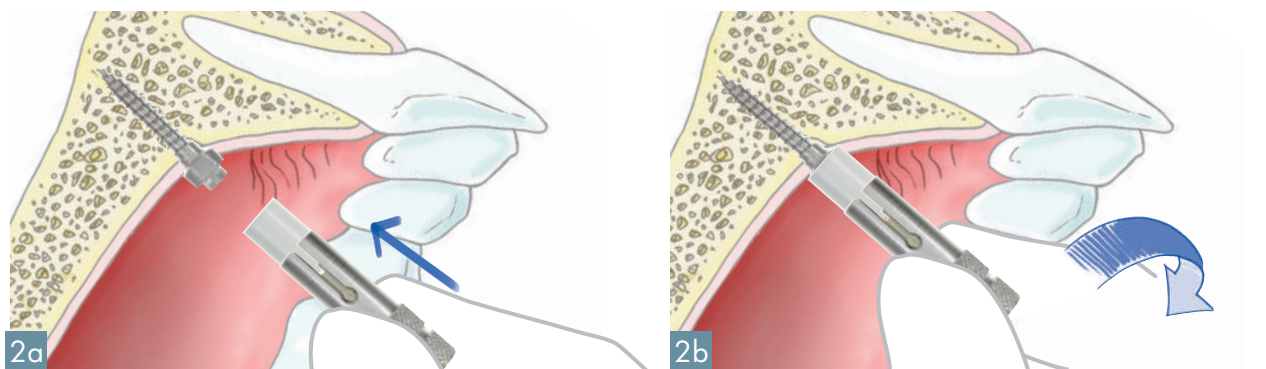

Прикрутите scan body для двухэтапного TAD PA к выступающей части TAD.

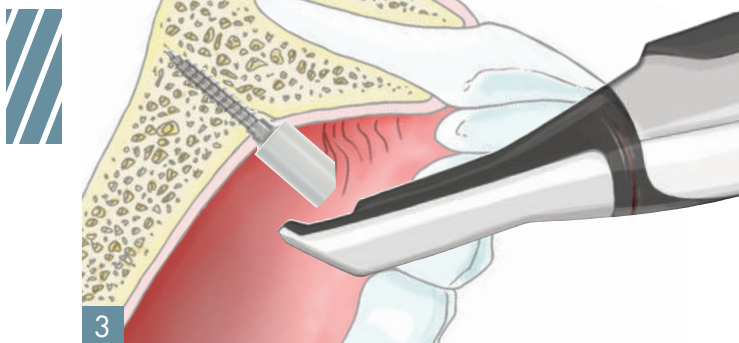

Снимите цифровой слепок для создания цифровой модели.



Proc. 08_04-21 April 1, 2021



Изображения и информация, представленные на этой странице, имеют только информативный характер и не предназначены для предоставления каких-либо терапевтических рекомендаций хирургу-стоматологу, стоматологу, зубному технику или пациенту. Leone Spa прямо отказывается от какой-либо ответственности и не дает никаких гарантий относительно точности или соответствия информации, представленной на этих страницах.

NEW

TAD VL — это мини-винты, специально разработанные для фиксированной вестибулярной или лингвальной фиксации соответствующих устройств или для использования проволоочных сегментов и/или пружин для облегчения перемещения зубов посредством ортодонтической тракции. Изготовлены из медицинского титана марки 5, благодаря самосверлящему наконечнику и специальной геометрии резьбы диаметром 2 мм и длиной 8 мм, они гарантируют простую, минимально инвазивную хирургическую процедуру и превосходную первичную стабильность.

TAD VL С ДВОЙНЫМ ПАЗОМ

Изготовлены из медицинского титана марки 5



TAD VL С КНОПЧНОЙ ГОЛОВКОЙ

Изготовлены из медицинского титана марки 5



**КНОПКА И
ОТВЕРСТИЕ**
для легкого наложения
эластичных цепочек и
тяг.

САМОСВЕРЛЯЮЩАЯ СПИРАЛЬ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОТУ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ И
ВЫСОКУЮ ПЕРВИЧНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ.



ВЫСОКАЯ ГОЛОВКА

НИЗКАЯ ГОЛОВКА

СТЕРИЛЬНАЯ УПАКОВКА
с носителем для имплантата
в цветовой маркировке в соответствии
с высотой и титановой опорой.

NEW




TAD VL С ДВОЙНЫМ ПАЗОМ

Головка мини-винта доступна в двух вариантах высоты над слизистой оболочкой и имеет закрытый двойной паз для установки проволочных и / или пружинных сегментов. Закрытый двойной паз имеет размер 0,018 "x 0,025" и может вмещать круглые или прямоугольные проволоки. Необходима минимально инвазивная хирургическая процедура: в один этап, через слизистую оболочку с очень хорошей первичной стабильностью для немедленного наложения ортодонтической тяги. TAD VL с двойным пазом поставляются стерильными, готовыми к использованию с соответствующими аксессуарами Leone и хирургическими инструментами.

В упаковке 1 шт

		Ø	L	
		мм	мм	
	низкая головка	8	005-2008-13	2
	высокая головка	8	005-2008-14	

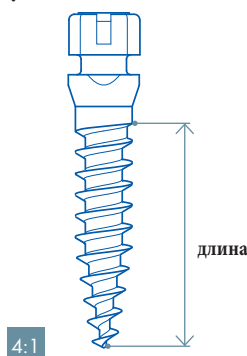ЗАКРЫТЫЙ
ДВОЙНОЙ ПАЗ

NEW




TAD VL С КНОПЧНОЙ ГОЛОВКОЙ

Головка мини-винта доступна в двух вариантах высоты над слизистой оболочкой (низкая головка и высокая головка) с формой кнопки и сквозным отверстием для облегчения наложения эластичных лигатур и спиральных пружин. Потребуется одноэтапная, трансмукозная и минимально-инвазивная хирургическая техника с оптимальной первичной стабильностью для немедленной нагрузки ортодонтического аппарата. TAD VL с кнопочной головкой поставляются стерильными, готовыми к использованию с соответствующими аксессуарами Leone и хирургическими инструментами.

В упаковке 1 шт

		Ø	L	
		мм	мм	
	низкая головка	8	005-2008-11	2
	высокая головка	8	005-2008-12	

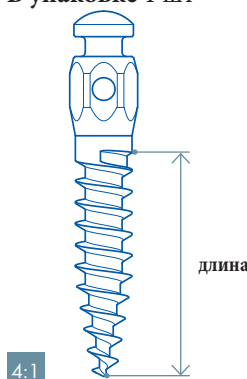КНОПКА И СКВОЗНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

090-1134-00 090-1334-00

1:1



Ø

1,1 мм

1,3 мм

L

9 мм

12 мм

СВЕРЛА ДЛЯ TAD

Изготовлены из биомедицинской нержавеющей стали. Они позволяют сделать пилотное отверстие в случае высокой плотности кости.

В упаковке 1 шт



080-1001-00 МУКОТОМ ДЛЯ TAD VL

Изготовлен из медицинского титана марки 5. Режущая кромка диаметром 2,2 мм позволяет создать подходящее отверстие в прикрепленной слизистой оболочке. К нему прилагается отвертка для адаптеров (арт. 080-1000-00). Автоклавируемый.

В упаковке 1 шт



080-1001-01 МАШИННЫЙ МУКОТОМ

Изготовлен из медицинского титана марки 5. Он используется с наконечником с низкими оборотами, что позволяет создать подходящее отверстие в прикрепленной слизистой оболочке. Диаметр 2,2 мм.

В упаковке 1 шт



080-1002-00 МАШИННЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ TAD VL С КНОПЧНОЙ ГОЛОВКОЙ

Изготовлен из нержавеющей стали, с эластомерным синим кольцом. Для использования с угловым наконечником для установки TAD VL с кнопочной головкой даже в труднодоступных местах. Автоклавируемый.

В упаковке 1 шт



080-1002-01 МАШИННЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ TAD VL С ДВОЙНЫМ ПАЗОМ

Изготовлен из нержавеющей стали. Он позволяет вводить TAD VL с двойным пазом с помощью углового наконечника даже в труднодоступных местах. Автоклавируемый.

В упаковке 1 шт

**080-1003-00****АДАПТЕР ДЛЯ ОТВЕРТКИ И РАЧЕТА ДЛЯ TAD VL С КНОПЧНОЙ ГОЛОВКОЙ**

Изготовлен из нержавеющей стали, с эластомерным синим кольцом. Он позволяет устанавливать TAD VL с кнопочной головкой даже в труднодоступных местах с помощью ручной отвертки (артикул 156-1001-01) или рачета (артикул 156-1014-00).

Автоклавируемый.

В упаковке 1 шт

156-1001-01**РУЧНАЯ ОТВЕРТКА**

Изготовлена из медицинского титана марки 5. Для затягивания или ослабления TAD VL с кнопочной головкой с помощью адаптера для отвертки и рачета (артикул 080-1003-00). Со сквозным отверстием для страховочной проволоки. (Продукт из каталога системы имплантатов Leone). Автоклавируемый.

В упаковке 1 шт

**156-1014-00****РАЧЕТ**

Изготовлен из медицинского титана марки 5. Для затягивания или ослабления TAD VL с кнопочной головкой с помощью адаптера для отвертки и рачета (артикул 080-1003-00). Не разбирать! (Продукт из каталога системы имплантатов Leone). Автоклавируемый.

В упаковке 1 шт



1:2

080-1000-00**ОТВЕРТКА ДЛЯ АДАПТЕРОВ**

Изготовлена из алюминия. Для затягивания или ослабления TAD с помощью адаптера. Автоклавируемый.

В упаковке 1 шт




1:1

080-1000-22**АДАПТЕР ДЛЯ TAD VL С КНОПЧНОЙ ГОЛОВКОЙ**

Изготовлен из нержавеющей стали, с эластомерным синим кольцом. Для затягивания или ослабления TAD VL с кнопочной головкой с помощью отвертки для адаптеров (артикул 80-1000-00). Автоклавируемый.

В упаковке 1 шт

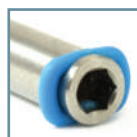

1:1

080-1000-23**АДАПТЕР ДЛЯ TAD VL С ДВОЙНЫМ ПАЗОМ**

Изготовлен из нержавеющей стали, с эластомерным серым кольцом. Для затягивания или ослабления TAD VL с двойным пазом вручную с помощью отвертки для адаптеров (REF 080-1000-00).

Автоклавируемый.

В упаковке 1 шт



070-0001-06

**ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР
ДЛЯ TAD VL**

NEW

Изготовлен из пластика PPSU, сконструирован, что бы стерилизовать и хранить в операционной организованными, только инструменты, необходимые для установки TADs VL и их принадлежности. Крышка при открытии наклоняет положение набора и обеспечивает легкий доступ к инструментам. Набор состоит из 6 инструментов (можно заполнить до 13):

- отвертка для адаптеров
 - адаптер для TAD VL с кнопочной головкой
 - адаптер для TAD VL с TADs VL с двойным пазом
 - адаптер для наконечника TAD VL с кнопочной головкой
 - адаптер для наконечника TAD VL с двойным пазом
 - адаптер для отвертки и рачета для TAD VL с кнопочной головкой
- Полностью автоклавируемый.




NEW

070-0001-00
**ПУСТОЙ
НАБОР**




ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА


Конструкция ортодонтического аппарата с костной опорой требует точного планирования лечения клиницистом, который, основываясь на своих суждениях и подготовке, в каждом конкретном случае должен учитывать также все результаты предоперационных обследований, таких как: анамнез, объективные обследования, рентгенологические, инструментальные и лабораторные исследования. Как только поле хирургического вмешательства и наиболее подходящие TAD VL определены, необходимо провести анестезию. TAD VL являются самосверлящими, однако в случае высокой плотности или толщины кости рекомендуется просверлить кортикальную пластинку сверлом для мини-имплантатов Ø 1,5 мм (арт. 090-1134-00 или арт. 090-1334-00), чтобы легче было установить TAD VL.

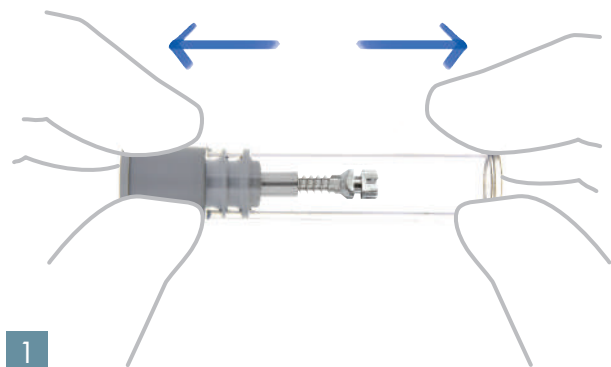


1 Слегка потянув за крышку флакона, извлеките TAD VL из стерильного флакона.

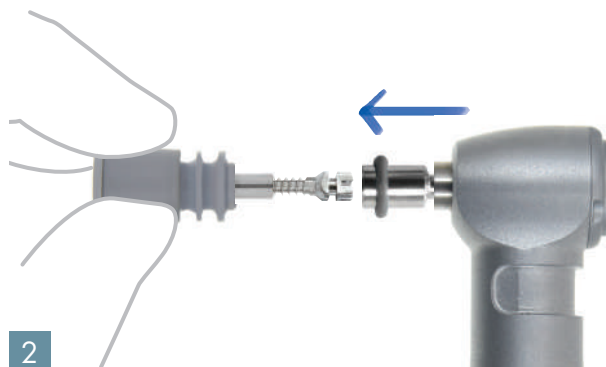

2 Подсоедините специальный машинный адаптер к головке TAD VL.

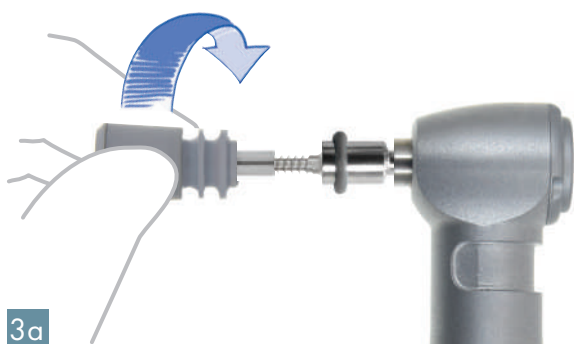


3a

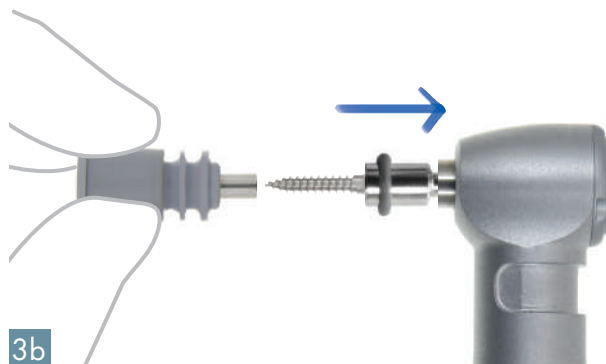


3b

После установки в адаптер TAD VL снимите колпачок имплантата легким вращательным движением против часовой стрелки.

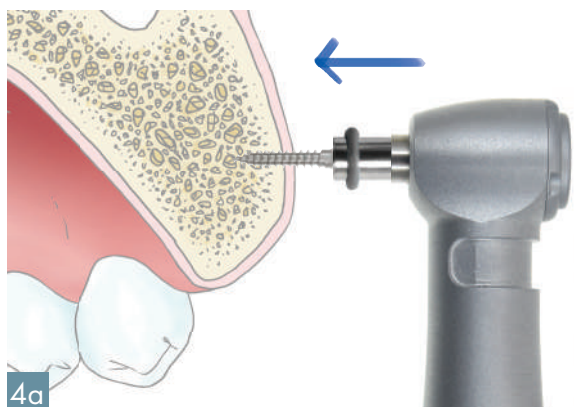

4a

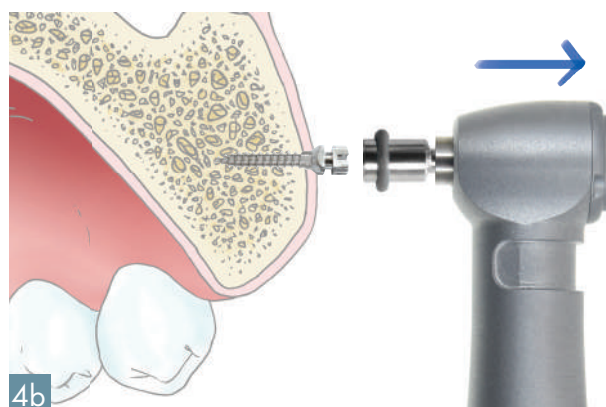

4b

Установите скорость максимально 25 об/мин и торк 40 Нсм, начните сверление TAD VL в небном своде.



Изображения и информация, представленные на этой странице, имеют только информативный характер и не предназначены для предоставления каких-либо терапевтических рекомендаций хирургу-стоматологу, стоматологу, зубному технику или пациенту. Leone Spa прямо отказывается от какой-либо ответственности и не дает никаких гарантий относительно точности или соответствия информации, представленной на этих страницах.