


ЩИПЦЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

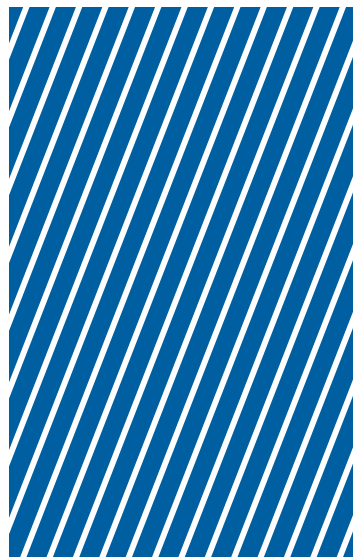


P



Leone предлагает широкий выбор щипцов и ортодонтических инструментов, некоторые из которых отмечены красным символом ***, чтобы подчеркнуть их качество.

Эти инструменты изготовлены из нержавеющей стали повышенной прочности и защищены от любых процессов стерилизации. Режущие пластины и наконечники из твердого металла припаяны золотом к корпусу щипцов для увеличения срока службы инструмента.

Форма и винтовое соединение эргономично спроектированы для удовлетворения любых ортодонтических требований.

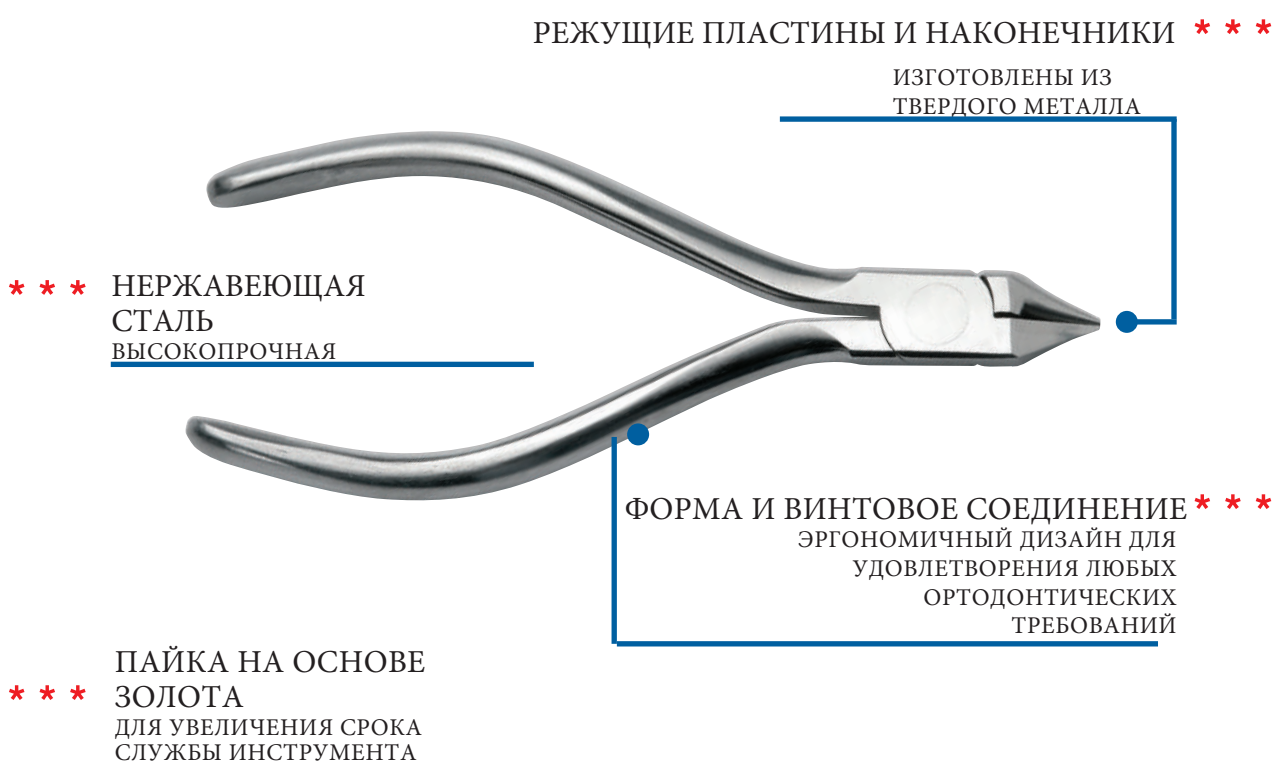

ЩИПЦЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ



P1900-00 * * *
**КЛЮВОВИДНЫЕ ЩИПЦЫ
ANGLE STYLE**

Необходимы для работы с круглой проволокой диаметром до .032" (0,80 мм). Клювы щипцов имеют размер .040" на кончике. Угол 9° отшлифован по бокам пирамидального клюва, чтобы обеспечить упругость проволоки. Клювы параллельны при раскрытии плоскогубцев .020" (0,51 мм).



P1901-00 * * *
**ЩИПЦЫ TWEED STYLE ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ**

Щипцы предназначены для формирования петель на круглых и прямоугольных дугах размером до 0,022" x 0,028" (0,56 x 0,71 мм). Цилиндрический клюв имеет два сечения: 0,043" (1,09 мм) и 0,063" (1,60 мм).

P1450-00
**ЗАПАСНАЯ НАСАДКА ДЛЯ
P1901-00**



P1902-00 * * *
**ЩИПЦЫ TWEED STYLE ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ**

Щипцы предназначены для формирования петель на дугах до 0,22 дюйма (0,56 мм).



P1352-00
**ЩИПЦЫ TWEED STYLE ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ УЗКИХ
ПЕТЕЛЬ**

С заостренными клювами для образования петель и пружин небольшого размера.



P1903-00
**ЩИПЦЫ YOUNG
STYLE**

Для проволоки диаметром до .040 дюйма (1,02 мм).



P1156-00 * * *
**ОПТИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ
MERRIFIELD STYLE**

Щипцы с конусообразным и вогнутым клювами из нержавеющей стали со вставками из карбида вольфрама, предназначенные для изготовления петель, омега-петель и дистальных упоров на круглых и прямоугольных дугах. Одобрен Международным фондом С.Н. Tweed



P1904-00
ЩИПЦЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
МАЛЕНЬКИХ ПЕТЕЛЬ

* * *

Более длинные и заостренные клювы, чем у щипцов ANGLE STYLE. Отлично подходят для изгибания петель небольшого диаметра. Для дуг диаметром до 0,018" (0,46 мм).



P1130-00
ЩИПЦЫ КОНТУРНЫЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ИЗГИБОВ



Для придания контура дугам и формирования изгибов в области клыков



P1073-00
ЩИПЦЫ NANCE STYLE ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ
РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА

С 4-секционным наконечником для формирования петель различного размера на круглой и прямоугольной дуге. Для дуг до 0,028 дюйма (0,71 мм).



P1154-00
ЩИПЦЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
СРЕДНИХ ПЕТЕЛЬ
OPTICAL STYLE



Для круглых дуг до .028" (0,71 мм).



P1155-00
ЩИПЦЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНИХ
ПЕТЕЛЬ OPTICAL STYLE



Для формирования больших петель на жестких дугах или на дугах для губного бампера до 0,032 дюйма (0,8 мм).





P1905-00 * * *
ЩИПЦЫ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ
И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДУГ
TWEED STYLE

Для использования с квадратными или прямоугольными дугами. Лезвия параллельны при открытии щипцов. Для дуг до 0,020 дюйма (0,51 мм). Рабочие кромки тщательно обработаны алмазной заточкой, чтобы предотвратить зазубрины на дуге.




P1906-00 * * *
ТРЕХКЛЮВНЫЕ
ЩИПЦЫ ADERER
STYLE СРЕДНИЕ

Для проволоки до .036" (0,91 мм).




P1075-01 * * *
ТРЕХКЛЮВНЫЕ ЩИПЦЫ
ADERER STYLE ТОНКИЕ

Для круглых дуг до 0,020" (0,51 мм) и прямоугольных до 0,021"х.025" (0,53х0,64 мм).

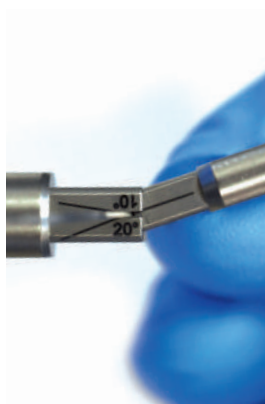

P1635-00
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗГИБАНИЯ ДУГ .019"х.025", И
ДЛЯ .021"х.025"/.027"

Инструмент состоит из двух концов, для легкого приложения торка к части дуги возле определенного брекета. Инструмент с U-образным концом используется для разметки и фиксации выбранной части дуги. Дополнительный инструмент используется для надежного удержания прямоугольной дуги и приложения желаемого торка. Благодаря наличию транспортира с лазерной маркировкой можно проверить заданный торк. Один конец инструмента предназначен для дуг .019"х.025", другой – для .021"х.025"/.027".

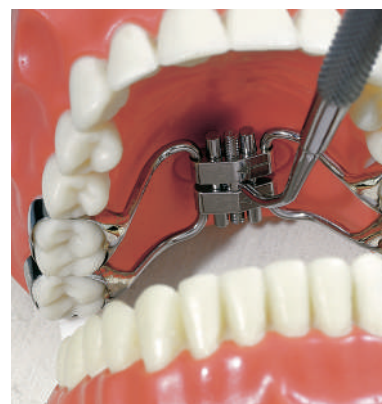

P1621-00
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ВНУТРИРОВОЙ
АКТИВАЦИИ

Предназначен для всех многофункциональных ортодонтических винтов.





P1907-00 * * *
ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ HOW
STYLE

Захватывающие подушечки 3/32 дюйма (2,4 мм) зазубрены и их центральная линия совпадает с осью вращения щипцов. Клювы закруглены для полной безопасности губ.



P1908-00 * * *
ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ HOW
STYLE

Аналогичны P1907-00, но с захватывающими подушечками 1/8 дюйма (3,2 мм).



P1909-00 * * *
ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ HOW
STYLE

Аналогичны P1908-00, но изогнуты под углом 45°.



P1910-00 * * *
ЩИПЦЫ WEINGART STYLE

Классический дизайн, кончики тщательно закруглены, что делает эти щипцы полностью безопасными для полости рта. Полезны для удаления керамики.



P1912-00 * * *
ЩИПЦЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И
ПРИДАНИЯ КОНТУРА
ДУГАМ


С тремя насечками для дуг 0,016", 0,018" и 0,022".



P1913-00 * * *
ЩИПЦЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ДУГ

Без насечек.

ДИСТАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ ДЛЯ ДУГ И ЛИГАТУР

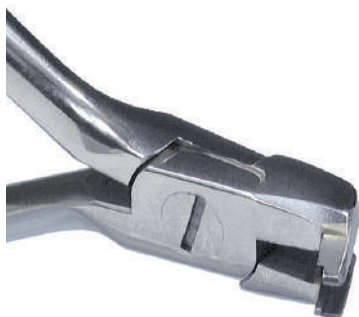

P1916-00

ДИСТАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ С УДЕРЖАНИЕМ ПРОВОЛОКИ

Особая конструкция этих кусачек позволяет безопасно отрезать дугу на дистальном конце во рту пациента. Они перерезают дугу, а затем надежно удерживают свободный дистальный конец.

Максимальная режущая способность:

- прямоугольные дуги размером до 0,022 "x 0,028" (0,56 x 0,71 мм);
- круглые дуги до 0,020 дюйма (0,51 мм);
- дуги twist .016" (0,41 мм).



P1915-00

МИКРОДИСТАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ С УДЕРЖАНИЕМ ПРОВОЛОКИ

Небольшие размеры не влияют на качество. Они перерезают дугу и надежно удерживают свободный дистальный конец.

Максимальная режущая способность:

- прямоугольные дуги размером до 0,022 "x 0,028" (0,56 x 0,71 мм);
- круглые дуги до 0,020 дюйма (0,51 мм);
- дуги twist .016" (0,41 мм).



P1914-00

МИКРОДИСТАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ С УДЕРЖАНИЕМ ПРОВОЛОКИ С ДЛИННЫМИ ИЗОГНУТЫМИ РУЧКАМИ

Изогнутое положение ручек под углом 10° обеспечивает более широкий обзор полости рта.

Максимальная режущая способность:

- прямоугольные дуги размером до 0,022 "x 0,028" (0,56 x 0,71 мм);
- круглые дуги до 0,020 дюйма (0,51 мм);
- дуги twist .016" (0,41 мм).





P1917-00 * * *
КУСАЧКИ ДЛЯ ДУГ И
ЖЕСТКОЙ ПРОВОЛОКИ

Для резки ортодонтических дуг.
Максимальная режущая
способность:

- прямоугольные дуги
до .022" x .028" (0,56 x 0,71 мм);
- круглые дуги до 0,020" (0,51
мм)



P1918-00 * * *
ЛИГАТУРНЫЕ КУСАЧКИ,
ИЗОГНУТЫЕ ПОД УГЛОМ 45°

Изгиб на 45° обеспечивает
легкий доступ к задним
областям, тем самым устраняя
любые травмы щеки.
Максимальная режущая
способность:
- лигатурная проволока до
0,014 дюйма (0,36 мм).




P1919-00 * * *
МИНИАТЮРНЫЕ
ЛИГАТУРНЫЕ КУСАЧКИ

Для мягких проволок.
Максимальная режущая
способность:
- лигатурная проволока до
0,014 дюйма (0,36 мм).



P1099-00
КУСАЧКИ ДЛЯ
ПРОВОЛОКИ

Кусачки для жесткой
проволоки толщиной
до 1,5мм

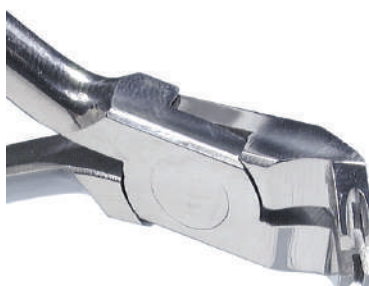

P1911-00 * * *
КРАМПОННЫЕ ЩИПЦЫ
ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ
КРЮЧКОВ И СТОПОРОВ

Щипцы предназначены для
создания хирургических
крючков в дуге. Также их
можно использовать для
создания круглых или
прямоугольных стопоров.





P1920-00 * * *
ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ
БРЕКЕТОВ

Минимум дискомфорта для пациента. Острые наконечники заходят за выступ брекета и легко снимают его.



P1921-00 * * *
ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ
БРЕКЕТОВ И КОМПОЗИТА С
ЭМАЛИ

Предназначены для легкого удаления приклеенных брекетов. Острый наконечник заходит за выступ брекета и легко снимает его. Щипцы также удаляют остатки адгезива с зуба.

P1451-00
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
НАКОНЕЧНИК ДЛЯ
P1921-00

P1452-00
ПЛАСТИНКА - 15 CM
ДЛЯ P1921-00



P1922-00 * * *
ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ
БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ
(ДЛИННЫЕ)

Необходим для удаления бандажных колец. Пластиковый мягкий наконечник и острый удаляющий клюв позволяют при легком надавливании быстро и аккуратно снимать кольцо.



P1923-00 * * *
ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ
БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ
(КОРОТКИЕ)

Тот же дизайн и функции, что и у P1922-00, но с более коротким носиком для лучшей окклюзионной поддержки.

P1453-00
ЗАПАСНАЯ НАСАДКА
ДИАМЕТРОМ 3/16"(4,8MM) ДЛЯ
P1922-00 , P1923-00





P1530-00 * * *
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЩИПЦЫ
ADAMS STYLE

Большие наконечники со вставками из карбида вольфрама. Необходимы для изгибания проволоки в лаборатории. Круглый конусообразный наконечник 1,3 мм и пирамидальная задняя часть 1,4 мм. Для проволоки диаметром до 1,5 мм. Отлично подходят для техники Крозат.



P1034-00 * * *
ЩИПЦЫ ТРЕХКЛЮВНЫЕ

Очень прочные, изгибают проволоку. Подходят для сгибания плеч эспандеров. Для проволоки диаметром до 1,5 мм.



P1099-00
КУСАЧКИ ДЛЯ
ПРОВОЛОКИ

Кусачки для жесткой проволоки толщиной до 1,5 мм

* * *
P1034-93
ЩИПЦЫ ТРЕХКЛЮВНЫЕ С
ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ
УДЕРЖАНИЯ ЭКСПАНДЕРОВ
И ИЗГИБАНИЯ ПЛЕЧ
(см. стр. 209)



 **P1162-00**
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЩИПЦЫ

Конусообразный дизайн.
Для проволоки до 0,9 мм



P1163-00
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЩИПЦЫ

Классический дизайн.
Для проволоки до 0,9 мм.



P1097-00
ЩИПЦЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАММЕРОВ NANCE STYLE

Для формирования кламмеров Адамса и небольших стопоров на дугах.
Для проволоки до 0,7 мм.




Ассортимент из 10 инструментов был подобран таким образом, чтобы удовлетворить любые основные ортодонтические потребности.

Щипцы и кусачки Classix изготавливаются из специальной и превосходной твердой стали, обеспечивающей оптимальное удержание проволоки и устойчивость наконечников к коррозии.

Все инструменты Classix оснащены специальным внутренним сбалансированным шарниром, обеспечивающим плавное и точное, долговечное движение.

Режущие пластины инструментов Classix имеют вставки из карбида вольфрама, заточенные алмазом для точной резки проволоки и длительного срока службы щипцов. Все инструменты полностью покрыты твердым хромом, что обеспечивает высокую стойкость при стерилизации.

Инструменты Classix оснащены эргономичными ручками и гладкими закругленными поверхностями, что обеспечивает ортодонту удобство в обращении и максимальную точность работы.

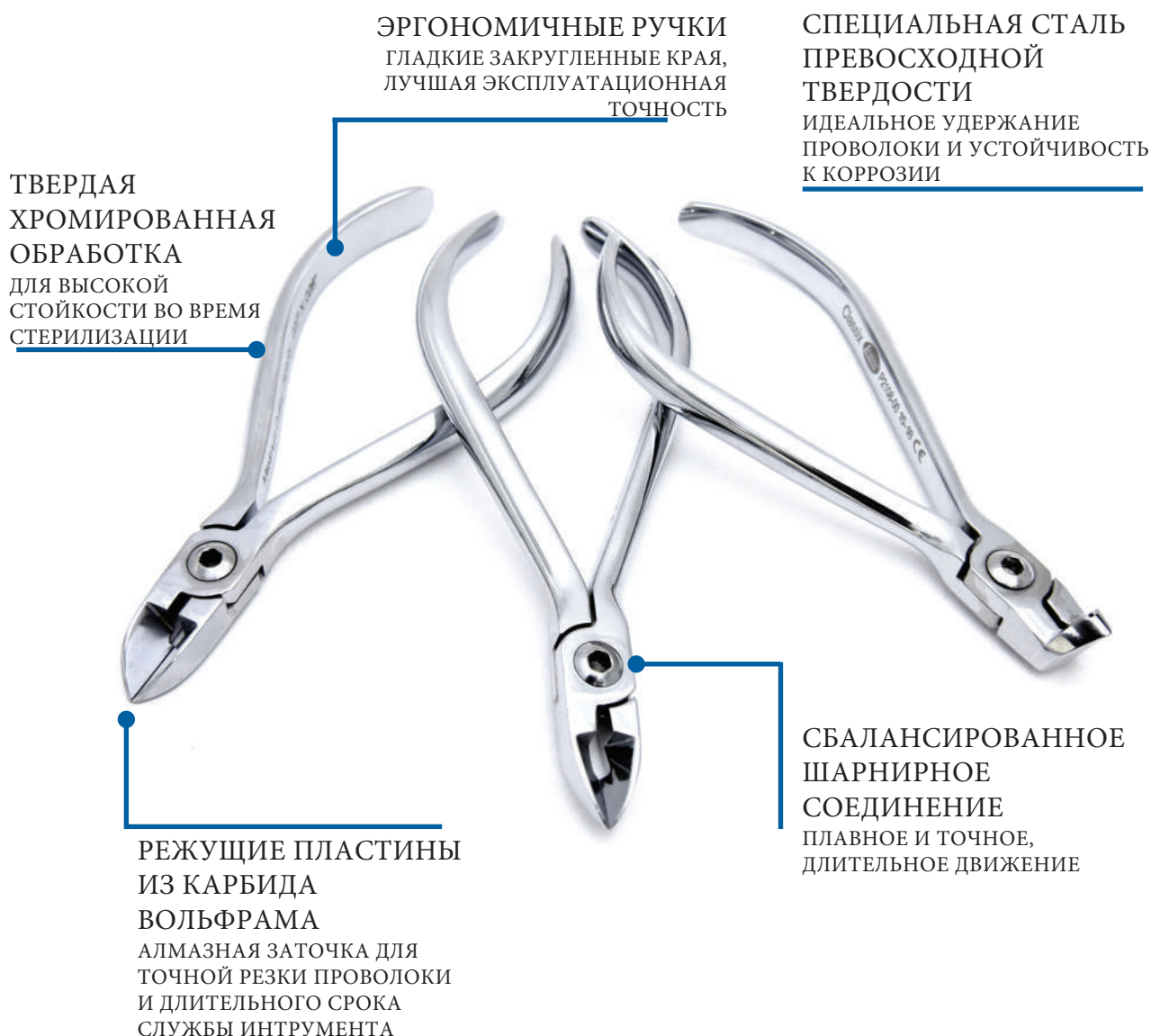



P2101-00
ЩИПЦЫ КЛЮВОВИДНЫЕ
ANGLE STYLE

Предназначены для обработки круглых дуг диаметром до 0,045 дюйма (1,14 мм). Длина клюва всего 0,025 дюйма (0,64 мм) на кончике позволяет сгибать петли и омега-петли, даже небольшого размера. По бокам прямоугольного клюва отшлифован угол в 10°, чтобы компенсировать пружинистость проволоки на этапе моделирования. Клювы параллельны отверстию щипцов 0,020 дюйма (0,51 мм) и отполированы алмазом для предотвращения зазубрин на проволоке.



P2104-00
ЩИПЦЫ WEINGART STYLE

Наконечники щипцов имеют форму, обеспечивающую надежное удержание дуг и приспособлений, и наклонены для улучшения обзора операционного поля. Два клюва отполированы алмазом, чтобы не повредить губы.



P2102-00
ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗГИБАНИЯ
ОМЕГА-ПЕТЕЛЬ TWEED STYLE

Вогнутый клюв имеет форму, позволяющую с легкостью создавать равномерные омега-петли. Круглый клюв имеет три деления: 0,045" (1,14 мм), 0,060" (1,52 мм), 0,075" (1,90 мм) и изготовлен из твердого сплава с электроотравлением для предотвращения проскальзывания проволоки. Наконечник можно легко заменить с помощью шестигранного ключа.

P2000-01
СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ
P2102-00
Упаковка 2 наконечника и 1 ключ.



P2105-00
ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ
БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ

Когда щипцы сомкнуты, наконечник для снятия без мягкой подушки не соприкасается с подушечкой: это позволяет ему зацепиться за трубку или аксессуар, или за край кольца, облегчая безопасное извлечение изо рта.

P2000-02
ЗАПАСНАЯ НАСАДКА
ДИАМЕТРОМ 3/16"(4,8ММ) ДЛЯ
2105-00



P2103-00
ТРЕХКЛЮВНЫЕ ЩИПЦЫ

Центральный выступ точно выровнен, и когда щипцы сомкнуты, он проходит по уровню двух боковых балок, образуя острые изгибы. Наконечники слегка заострены и отполированы алмазом, чтобы предотвратить зазубрины на дуге. Для круглых дуг диаметром до 0,036 дюйма (0,9 мм). Щипцы используют для quad helix, небных бюгелей и других аппаратов в полости рта.





P2106-00

**ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ
БРЕКЕТОВ И КОМПОЗИТА
С ЭМАЛИ**

Заостренные наконечники вклиниваются между краями основания брекета и поверхностью зуба: слегка приподняв брекеты, после этого брекеты легко снимаются без какого-либо повреждения эмали. Подходят также для снятия керамических брекетов.



P2107-00

**ЩИПЦЫ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ
И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДУГ
TWEED STYLE**

Для работы с квадратными или прямоугольными дугами диаметром до 0,020 дюйма (0,51 мм), закручивания и формирования точных изгибов. При открытии инструмента клювы параллельны и отполированы алмазом, чтобы предотвратить зазубрины на дуге.



P2108-00

**ДИСТАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ
ДЛЯ ДУГ С УДЕРЖАНИЕМ
ПРОВОЛОКИ**

Предназначены для обрезания излишков дистальной дуги и надежного удержания отрезанного участка дуги. Специальная конструкция и точная заточка режущих кромок позволяют использовать его как с тонкими, так и с коаксиальными дугами. Максимальная режущая способность:

- круглые дуги до 0,20 дюйма (0,51 мм)
- прямоугольные дуги до .022" x .028" (0,56 x 0,71 мм).



P2109-00

**КУСАЧКИ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ
ПРОВОЛОКИ**

Жесткая конструкция и качество заточки режущих кромок позволяют использовать проволоку любого сечения для несъемной ортодонтии. При максимальном смыкании заостренные концы касаются только кончика, чтобы обеспечить точное действие с любым сечением дуги. Максимальная режущая способность:

- круглые дуги до 0,020" (0,51 мм),
- прямоугольные дуги до .0022" x .028" (0,56 x 0,71 мм).



P2110-00

ЛИГАТУРНЫЕ КУСАЧКИ

Наконечники расположены под углом 15° для лучшего обзора вблизи лигатуры брекета. Режущие вставки имеют широкие опорные выступы, гарантирующие максимальное крепление к корпусу инструмента. Максимальная режущая способность: круглая проволока 0,015" (0,38 мм)




P1403-00

**КЛЮЧ ДЛЯ ШИПОВ
СЕРИИ CLASSIX**

Для соединения шипов.



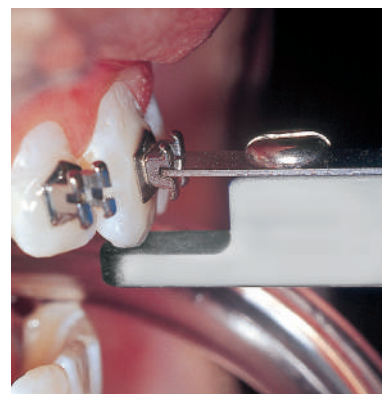

ЛИНЕЙНЫЕ ПОЗИЦИОНЕРЫ ДЛЯ БРЕКЕТОВ

Изготовлены из алюминия и нержавеющей стали. Поддаются автоклавированию. Используются с брекетами паза 0,018 " или 0,022". Цветовая маркировка для удобной идентификации.

цвет	размер	
зеленый	P1601-00	2 - 2,5 мм
красный	P1602-00	3 - 3,5 мм
синий	P1603-00	4 - 4,5 мм
фиолетовый	P1604-00	5 - 5,5 мм

P1600-95 Комплект из 4х позиционеров



P1026-00 ПИНЦЕТ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ



Удерживает любой тип брекетов, от широкого двойного до одинарного. Самофиксация брекета и освобождение нажатием. Несколько пинцетов можно предварительно нагрузить брекетами, чтобы зафиксировать их один за другим.



P1509-00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР

Небольшое устройство для измерения нужной высоты паза брекета.



P1098-00
ИНСТРУМЕНТ UTILITY



P1520-00
ОТВЕРТКА

Для использования с винтами с микропружиной. Наконечник 1,5 мм




P1630-00
МОДЕЛИРУЮЩИЙ НОЖ LE CRON STYLE



P1025-00
ДИНАМОМЕТР

Измеритель усилий растяжения и сжатия, создаваемых пружинами и эластиками, в максимальном диапазоне 16 унций (0,4536 кг). Он откалиброван с шагом 1 унция в одинарную линию и 4 унции в двойную линию.

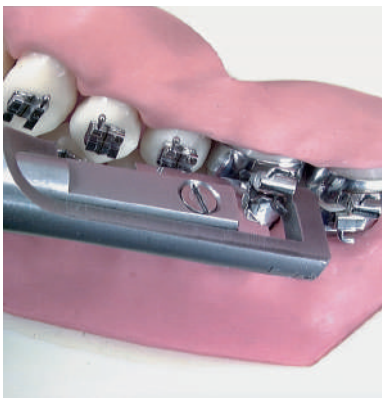

P1090-00
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ КРЫШКИ У КОНВЕРТИРУЕМЫХ ТРУБОК

Используется для упрощения преобразования прямоугольной трубки, когда требуется бандажирование второго моляра. Автоклавируемый.

P1090-01
СМЕННЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ P1090-00
В упаковке 2 шт

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С БАНДАЖНЫМИ КОЛЬЦАМИ **Leone**




P1001-01

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОЛЕЦ ИЗОГНУТЫЙ ТИП

Полностью изготовлен из нержавеющей стали. Для установки и регулировки колец. Активация осуществляется легко во всех положениях. С активирующей пружиной от 80 до 1000 грамм.

* * *

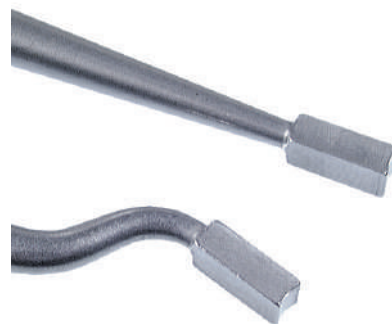

P1002-01

СМЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ P1001-01

P1000-01

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОЛЕЦ ПРЯМОЙ ТИП

Точно такой же, как P1001-01, но с прямым наконечником.

* * *

P1003-01

СМЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ P1000-01



P1077-00

АДАПТЕР MERSHON ДЛЯ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ



P1092-00

АДАПТЕР ДЛЯ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ



Простой, удобный в использовании и практичный. Он позволяет адаптировать кольцо к анатомии зуба, не оставляя зазубрин и не повреждая кольцо и зуб.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ЭКСПАНДЕРОВ И ИЗГИБАНИЯ ПЛЕЧ*

Удобный инструмент для надежного удержания экспандера; для последующего легкого и точного моделирования плеч с помощью специального инструмента для изгиба плеч P1620-02. Инструмент заканчивается захватывающим механизмом, который соответствует форме тела экспандера, чтобы избежать повреждения тела, и закрывается с помощью зажимного устройства, которое включается и выключается простым движением большого пальца. Толщина кромок зажимных концов отражает минимальное пространство, которое должно быть между телом экспандера и небным швом. Расположив инструмент с экспандером на гипсовой модели, правильный наклон и нужная высота изгиба плеч будут хорошо видны. Также полезно проверить экспандер перед использованием, открыв и закрыв экспандер специальным прямым ключом.


		для экспандеров
		P0620-00 A0620-08/09/11/13/15 A2620-07/10/12
		P0630-00 A0631-08/10/12
		P0621-00 A0621-08/11 A1621-08/11/13
		P0625-09 A0625-09
		P0625-07 A0625-07

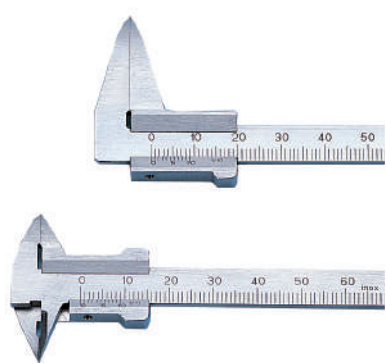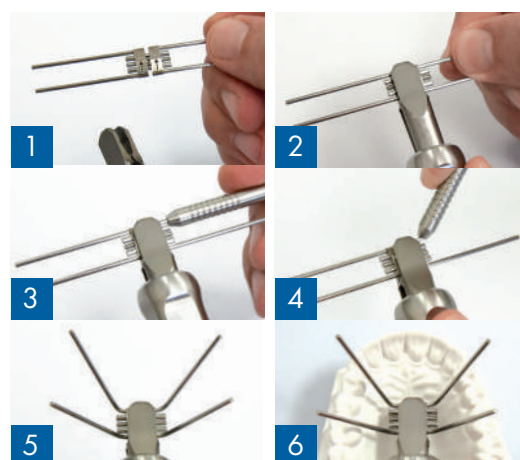

ЗУБНЫЕ ИЗМИРИТЕЛИ

P1078-15 С длинным наконечником

P1560-15 С двойным наконечником
Специально для внутренних и внешних измерений

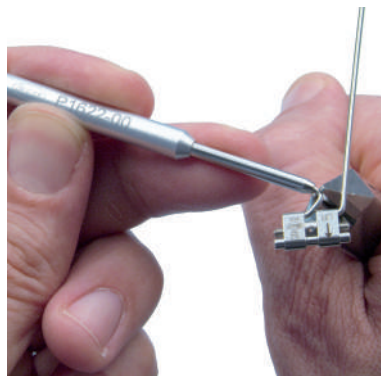

P1622-00
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗГИБАНИЯ ПЛЕЧ ДЛЯ АППАРАТА FAST BACK

Он облегчает работу техника при сборке аппарата. Позволяет поддерживать линейность плеч, которые должны скользить по небной трубке. Алюминиевая ручка, соединенная с трубкой из закаленной стали, обеспечивает надежный захват для получения точных изгибов.



P1620-02
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗГИБАНИЯ ПЛЕЧ ДЛЯ ЭКСПАНДЕРОВ

Идеально подходит для того, чтобы легко и точно сгибать плечи экспандера. Подходит также для экспандеров с длинными плечами.

*PATENTED



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЛИ КРУГЛЫХ ДУГ

Для формирования дуг с установлением торка или без него. Выпускаются шести видов в разных цветовых кодах. Корпус для дуг изготовлен из нержавеющей стали.



P1167-00
TURRET
СИНИЙ КОД

Для формирования прямоугольных дуг от 0,016 до 0,0215 дюйма



P1266-00
TURRET
ЧЕРНЫЙ КОД

Для формирования прямоугольных дуг с установлением торка: 0° - 10° - 16° - 23°. Для использования только с дугой: 0,016 x 0,022 дюйма.



P1168-00
TURRET
ЗОЛОТОЙ КОД

Для формирования прямоугольных дуг с установлением торка: 0° - 7° - 10° - 13° - 16°. Для использования только с дугой: 0,018".



P1267-00
TURRET
ФИОЛЕТОВЫЙ КОД

Для формирования прямоугольных дуг с установлением торка 0° - 10° - 16° - 23°. Для использования только с дугой: 0,016 x 0,016 дюйма.



P1170-00
TURRET
СЕРЕБРЯННЫЙ КОД

Для формирования прямоугольных дуг с установлением торка: 0° - 7° - 10° - 13° - 16°. Для использования только с дугой: 0,022".



P1169-00
TURRET
ЗЕЛЕНЫЙ КОД

Для формирования круглых дуг: 0,014" - 0,016" - 0,018" - 0,020".





P1139-00

ЛИГАТУРНЫЙ TUCKER


Инструмент с двумя наконечниками для установки или снятия эластической лигатуры. Полезен для закручивания металлических лигатур.



P1500-00

ЛИГАТУРНЫЙ THREADER

Облегчает наложение эластичных лигатур под лигатурные крылья брекетов

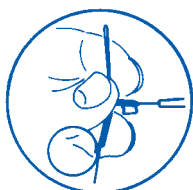

Courtesy of Prof. Federico Tenti, Author of "Guida alla scelta ragionata degli apparecchi ortodontici e rimovibili" distributed by Caravel.



P1576-00

TUCKER ДЛЯ ДУГ И ЛИГАТУРЫ

Используется для вставки дуги в паз брекета. Он также используется для закручивания металлических лигатур и наложения эластичных цепочек.



P1505-01

TWISTER ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛИГАТУРЫ K4430-25 И K4480-30

Изготовлен полностью из биомедицинской нержавеющей стали. Прокрутите инструмент, чтобы вставить предварительно сформированную лигатуру. Так же облегчает позиционирование лигатуры и упрощает фиксацию.



P1515-00

ВЕЕРООБРАЗНЫЙ РУЧНОЙ КЛЮЧ

Благодаря своей конструкции эта отвертка позволяет легко затянуть фиксирующие винты для аппаратов Telescopic Advancer



P0201-00

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СГИБАНИЯ АТТАЧМЕНТОВ TADs


Изготовлен из двух элементов, используется для легкого сгибания аттачментов TADs, в соответствии с анатомическими и лечебными нуждами. Оба компонента изготовлены из биомедицинской нержавеющей стали с лазерной маркировкой.



**ЛИГАТУРНЫЙ ЗАЖИМ
MATHIEU STYLE**


P1160-00 Наконечники 2,5 мм

P1161-00 Наконечники 1,5 мм

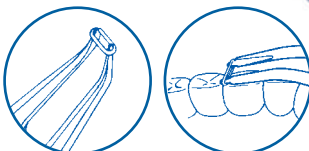

**P1141-00
ЩИПЦЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ
СЕПАРАЦИОННЫХ КОЛЕЦ**

Для установки
рентгеноконтрастных
сепарационных колец K6378-00.

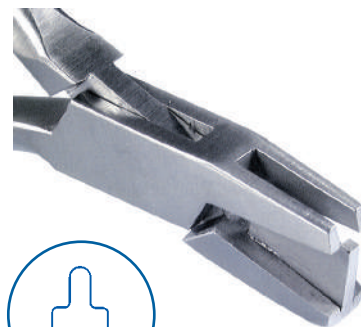

**P1142-00
ЩИПЦЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИГАТУРЫ**

Для мягкой проволоки до
0,014" (0,36 мм).



**P1089-00
МОСКИТ С
ИЗОГНУТЫМИ
КОНЦАМИ**

**P1088-00
МОСКИТ С
ПРЯМЫМИ КОНЦАМИ**



**P3000-01
ГУБНОЙ РЕТРАКТОР**

Хорошо переносится пациентами,
обеспечивает отличную видимость
и простоту использования.
Пластиковые ретракторы
соединены прочной стальной
дугой, не мешающей полю зрения.
Необходим при технике прямого
наклеивания брекетов и для
фотографий внутри полости рта.
Автоклавируемый. Прозрачный.



**P3000-91
КОМПЛЕКТ ГУБНЫХ
РЕТРАКТОРОВ**

Содержание комплекта:
- 5 пар прозрачных
ретракторов,
- 2 дуги.

